



Как создать карту пациента, загрузить в нее исследование и создать отчет.


- 1 Нажмите на кнопку «Добавить пациента».

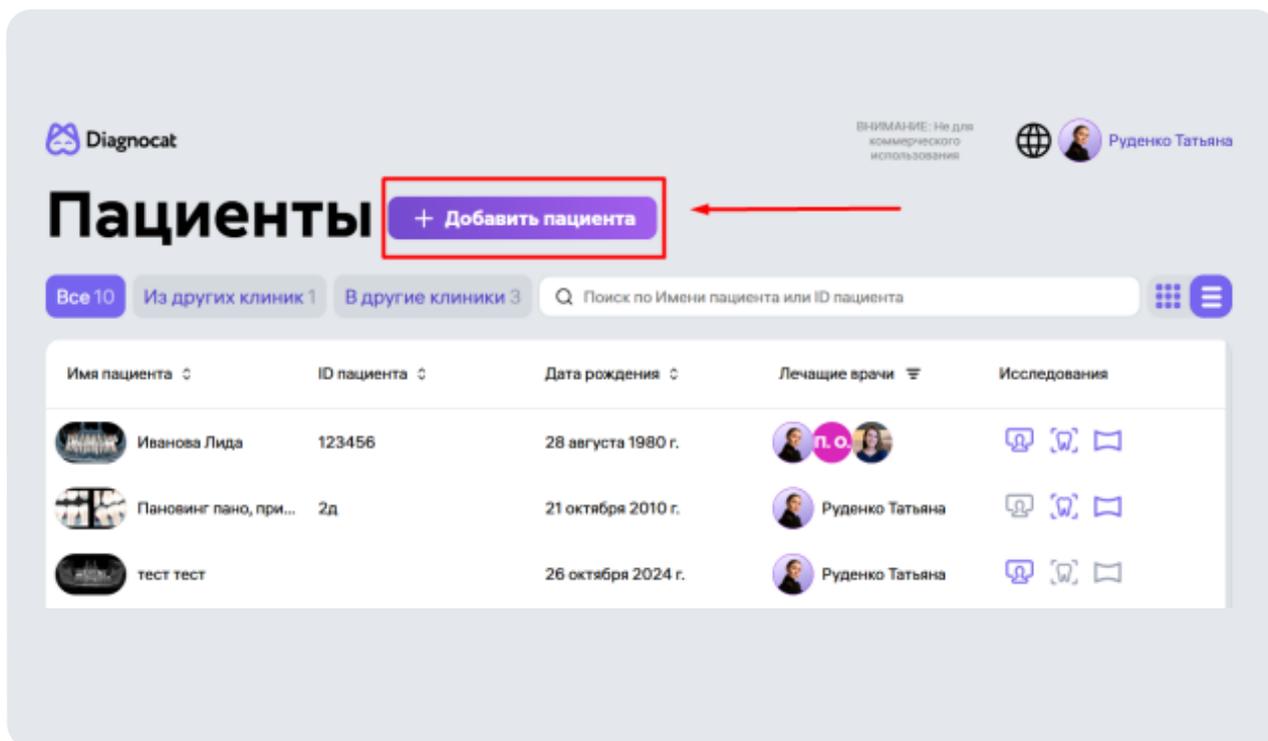


Заполните необходимые поля в форме и нажмите кнопку «Добавить».

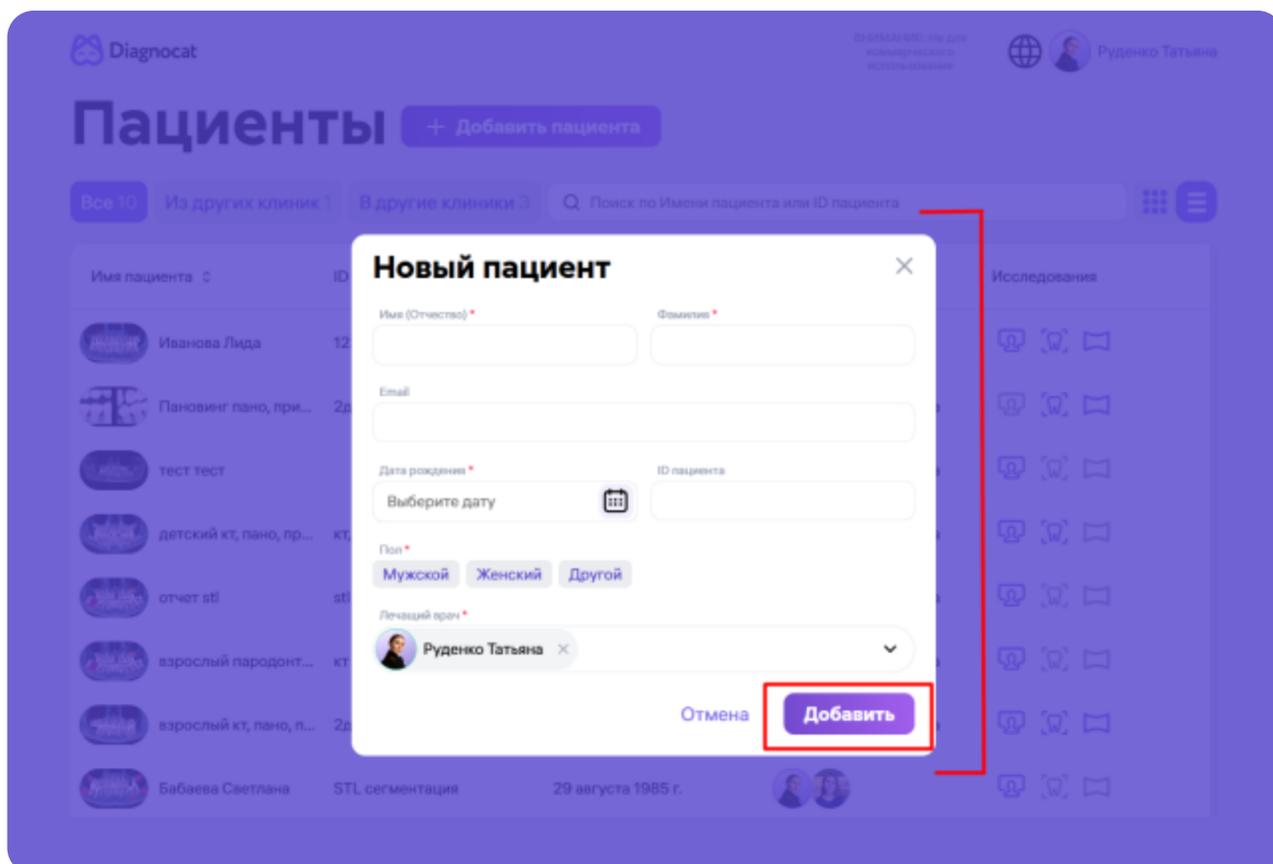


Наведите курсор на карточку пациента и кликните левой кнопкой мыши, чтобы перейти в его карточку.

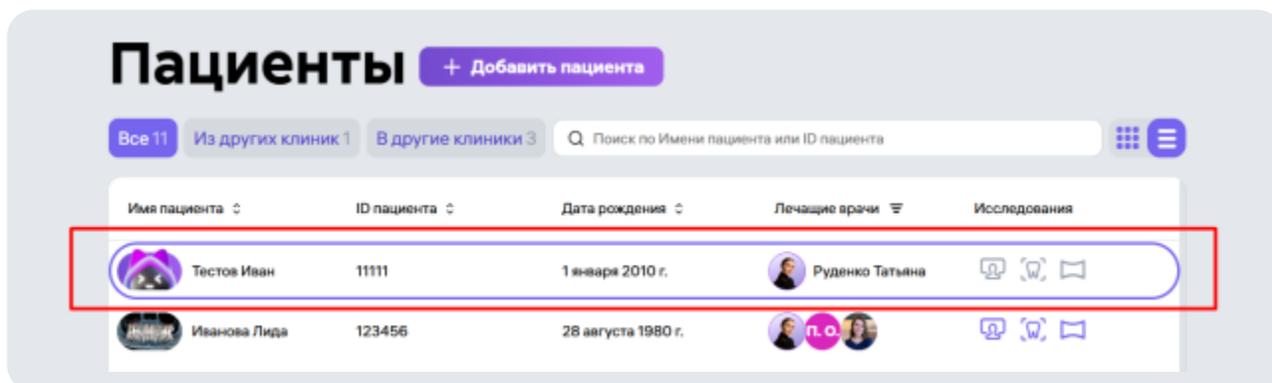



2 В карточке пациента выберите тип отчета, который необходимо сформировать, и кликните по нему левой кнопкой мыши.

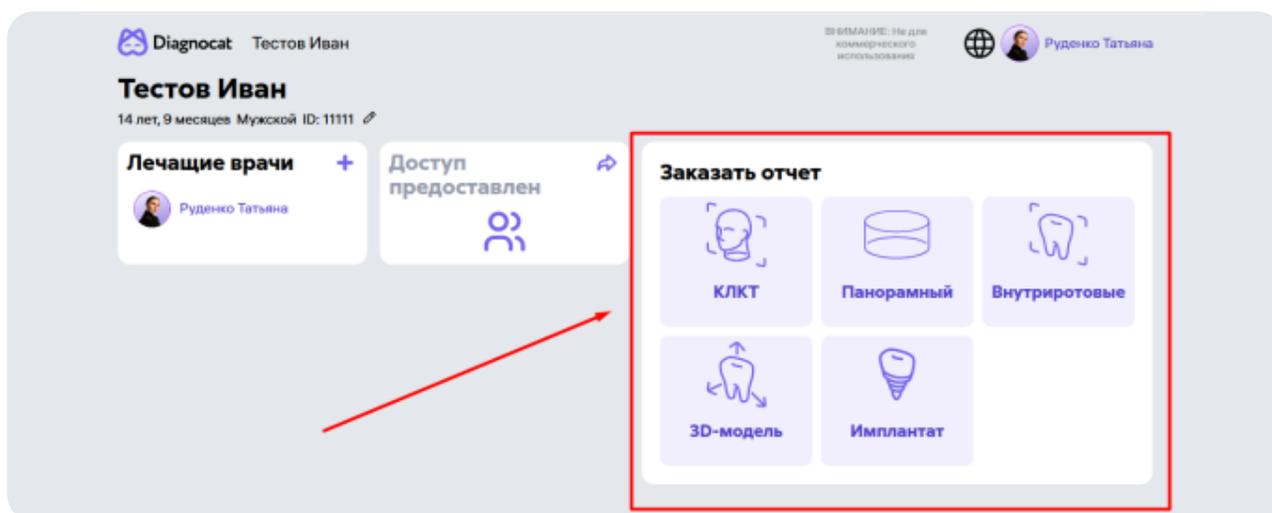

Загрузите или перетащите файлы/папку с исследованиями в выделенную область и нажмите кнопку «Заказать».

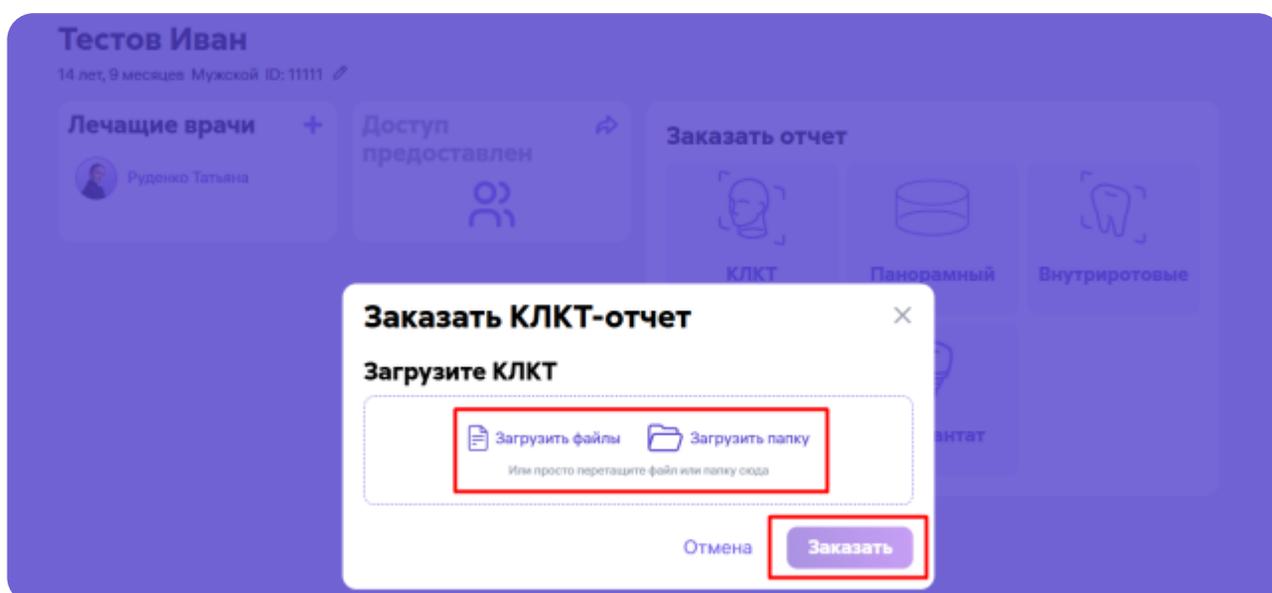


Если в карточку пациента ранее загружались снимки, нажмите на стрелку справа, чтобы раскрыть список с превью исследований. Выберите нужное или загрузите новое исследование с помощью кнопок ниже, если нужного КЛКТ нет среди ранее загруженных.

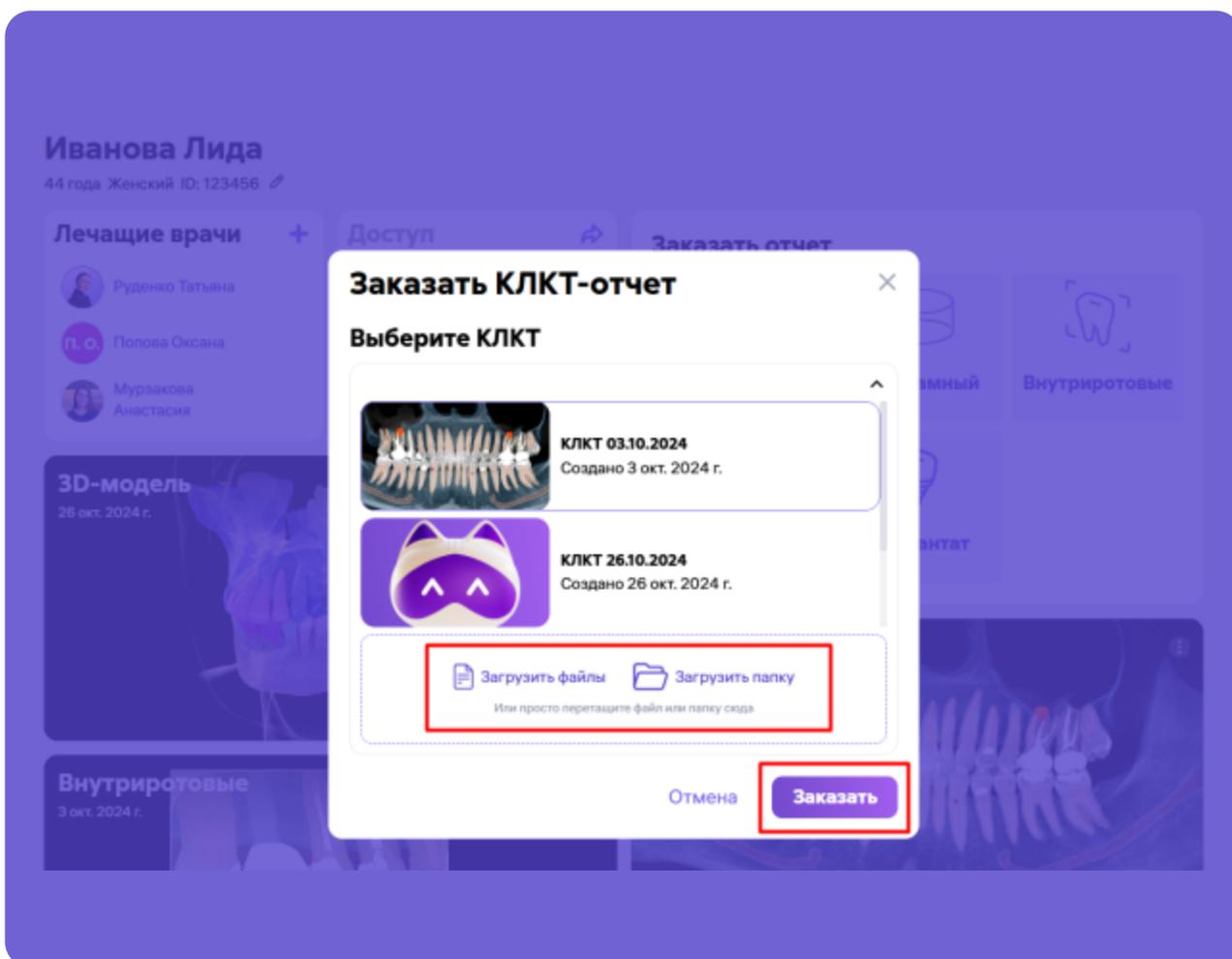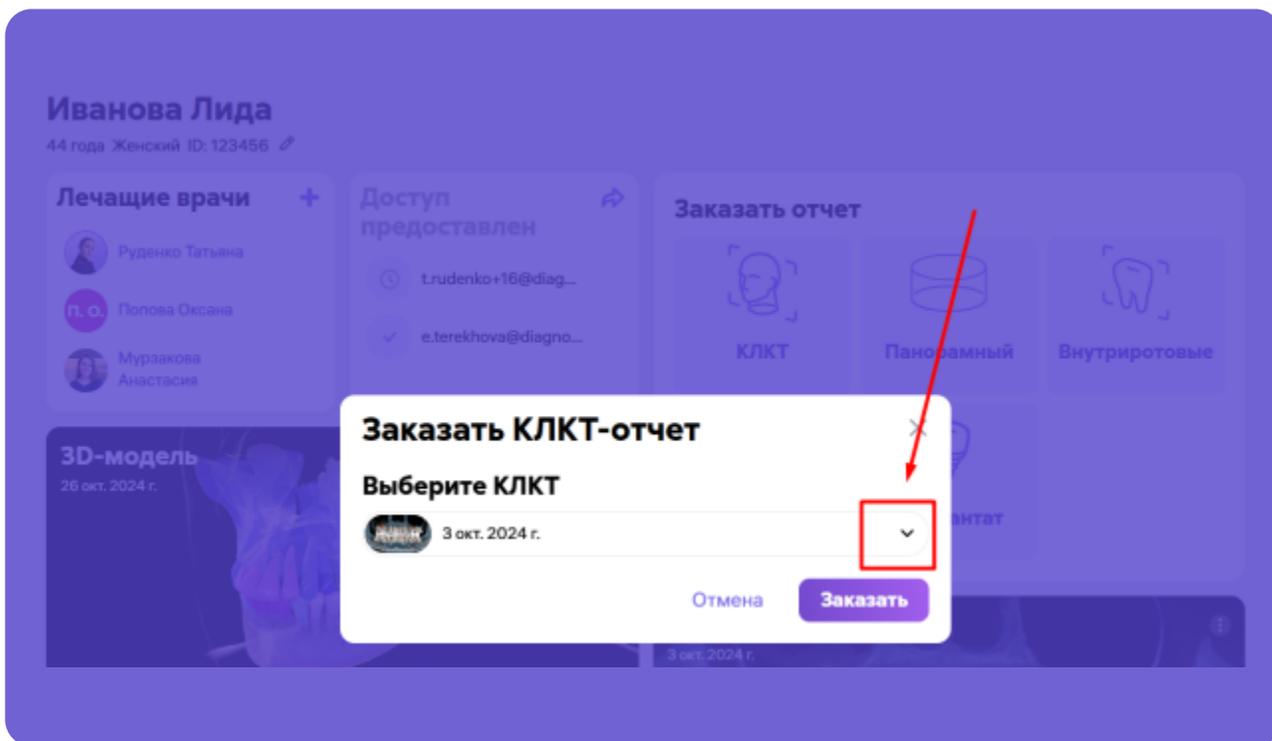


3 Дождитесь окончания загрузки исследования и формирования отчета.


Если исследование загружается впервые, в левом нижнем углу появится окно с индикатором прогресса загрузки.

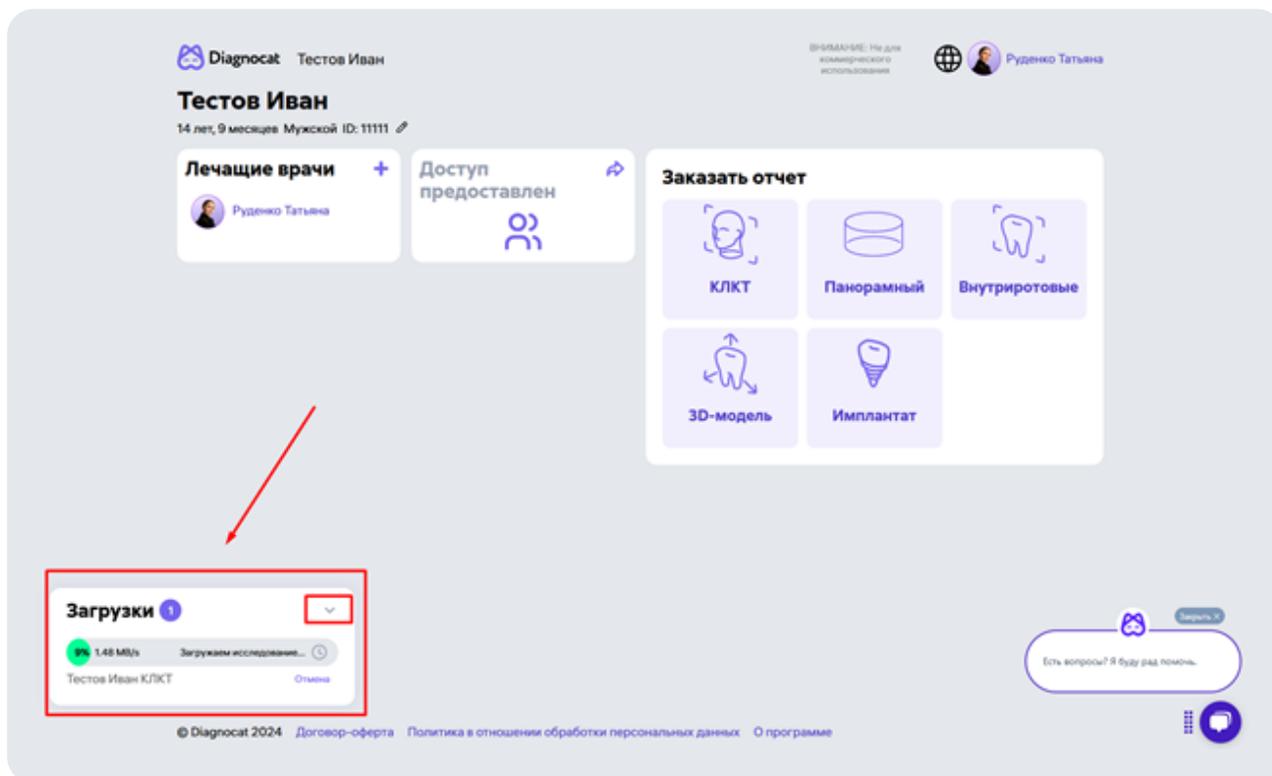


После окончания загрузки исследования или если вы выбрали исследование из загруженных ранее, появится окно с индикатором прогресса создания отчета.

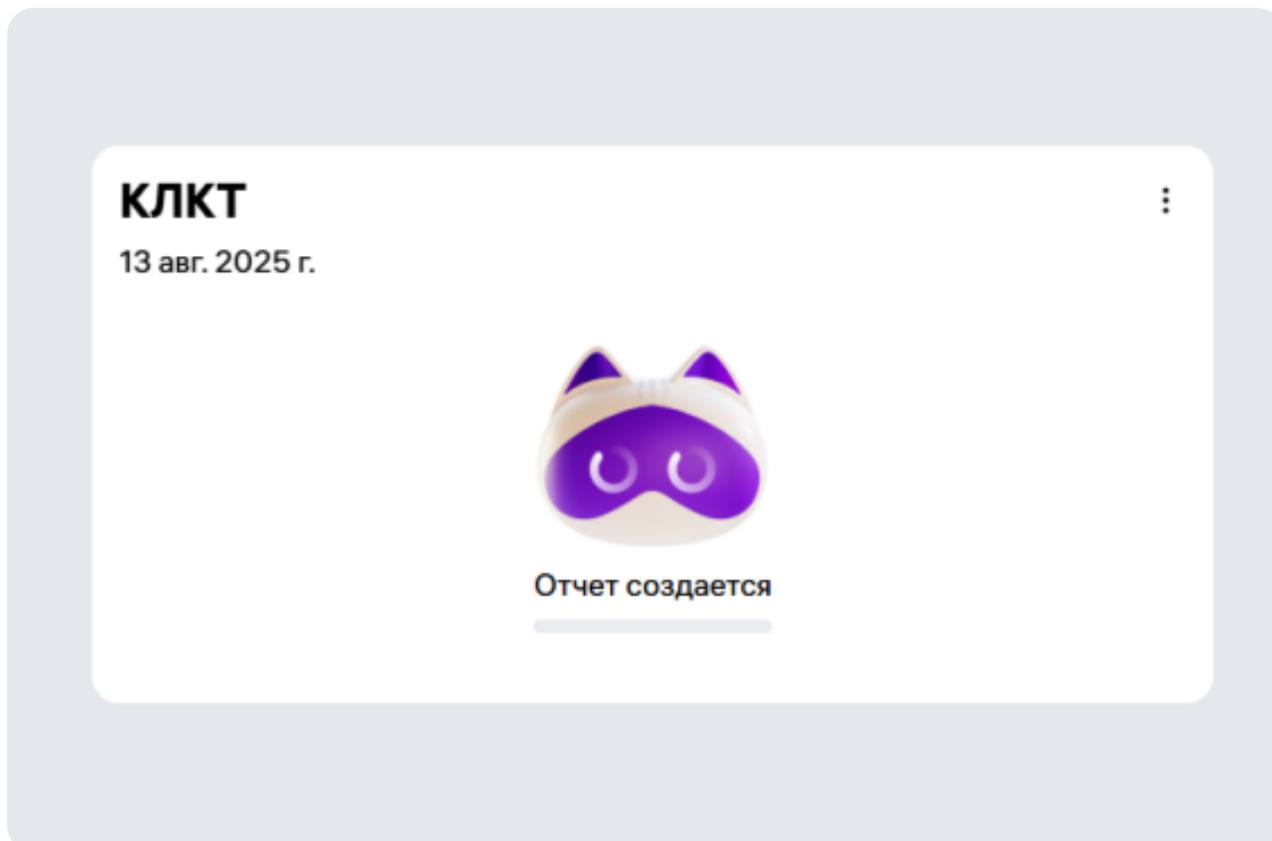

Когда отчет будет готов, появится окно предпросмотра с реформатом панорамы. Кликните на него, чтобы перейти к отчету.

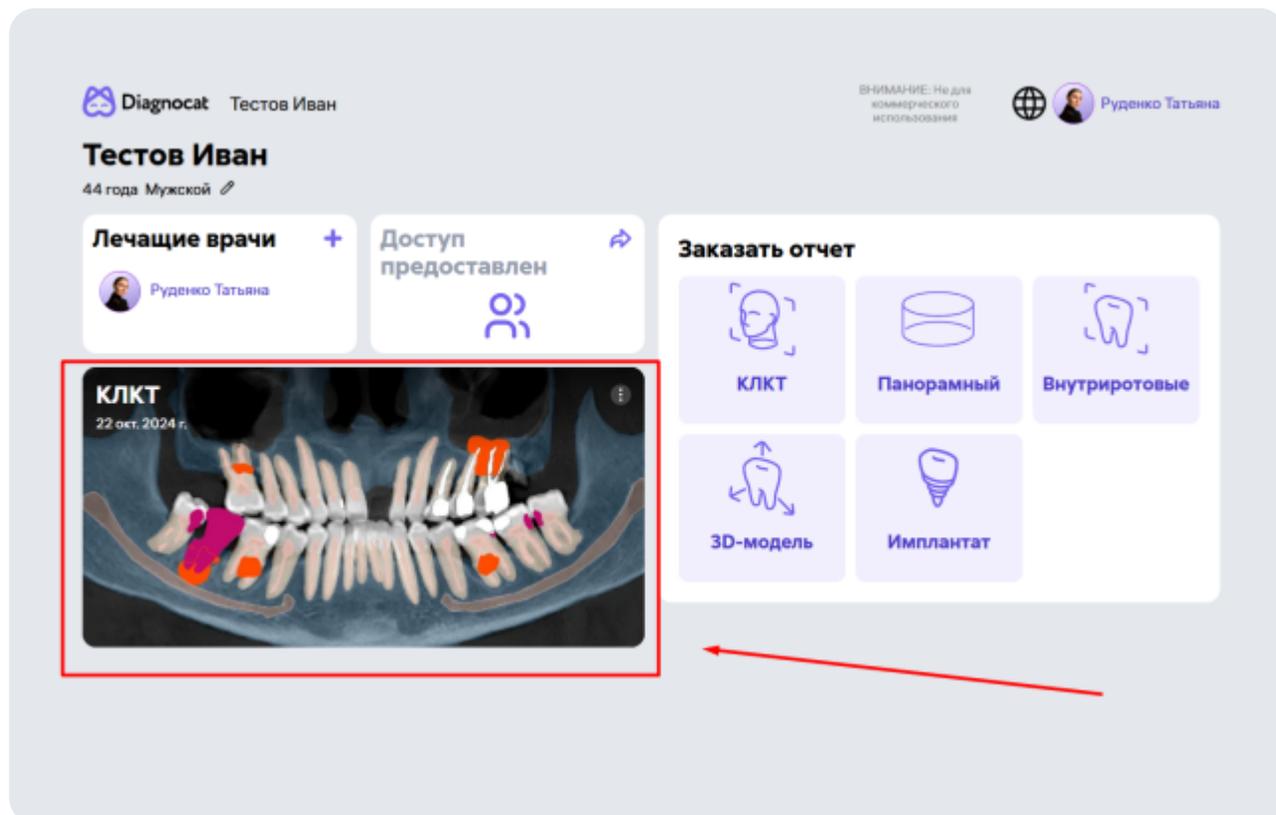

- 4 Нажав на значок «три точки» (меню действий), вы сможете скачать или удалить отчет, а также посмотреть подробную информацию.

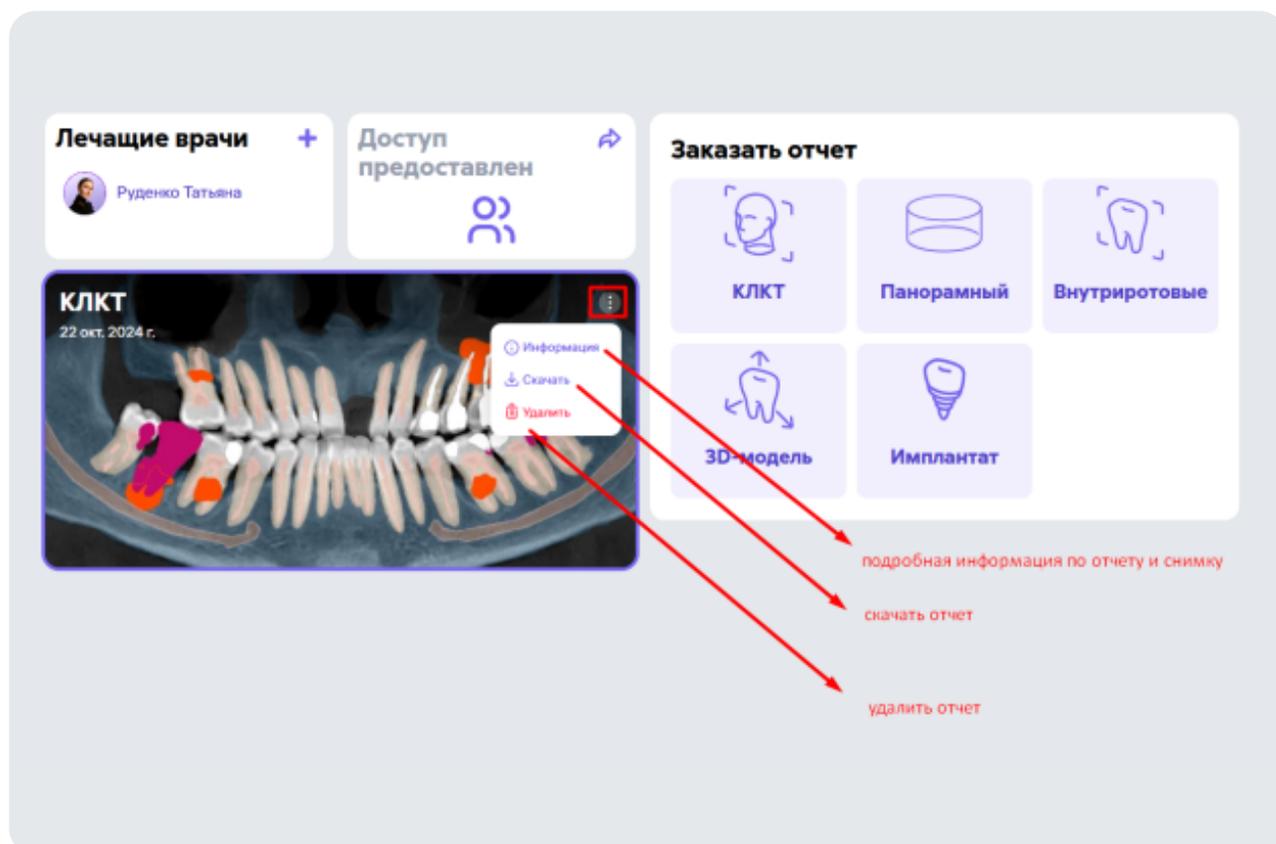

Нажав «Информация», вы сможете скачать исследование и заказать отчет повторно.

КЛКТ
22 окт. 2024 г.

Информация об отчете

КЛКТ

UID исследования: 2.16.840.114421.1.1.3.2414337...
Восьмь

Дата исследования: 26 дек. 2023 г., 20:06
Полое сканирования: -

Провайдер: Imaging Sciences International
Экспозиционная доза: -

Аппарат: 17-190XM

Версии отчета

ID csecf8v56fcc1qg2af00	26.10.2024	📄 🗑️
ID csbou2gfa0prf21780g	22.10.2024	📄 🗑️

Скачать КЛКТ СКАЧАТЬ КЛКТ

Заказать отчет ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ

