


## Как сгенерировать 3D-модель с наложением IOS на CBCT (наложение интраорального 3D-скана на КЛКТ)


- 1 В карточке пациента нажмите на кнопку заказа отчета «3D-модель»

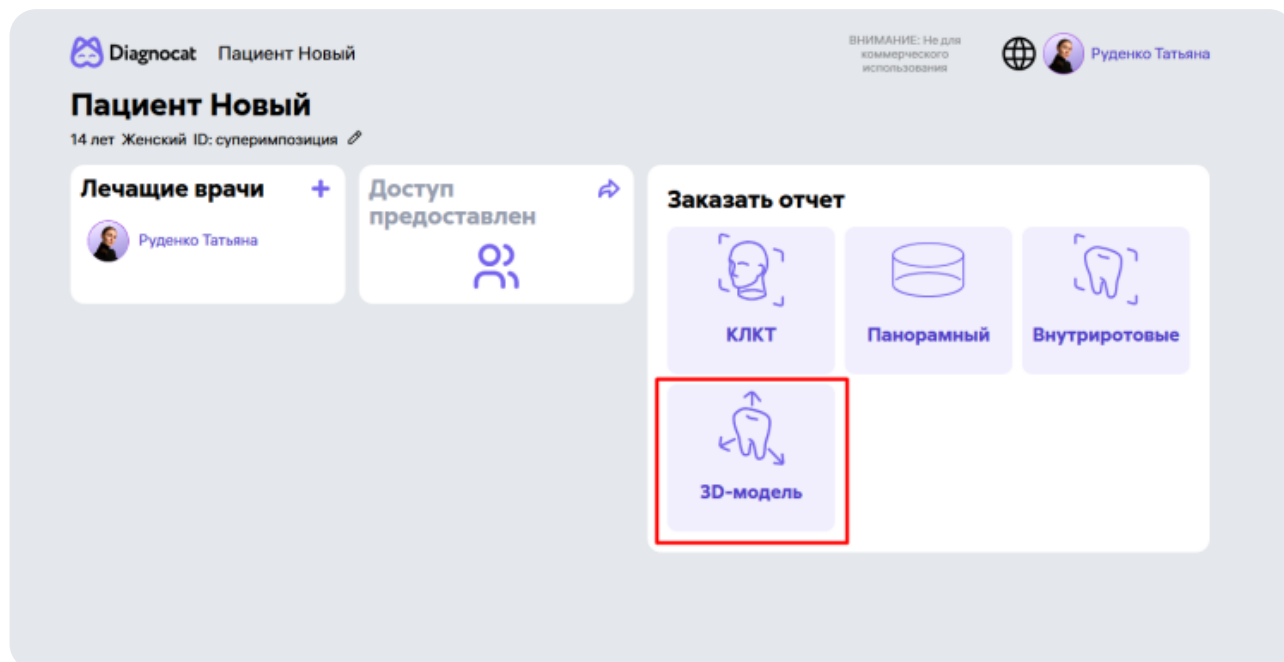

- 2 Загрузите или выберите исследование КЛКТ

Если вы загружаете исследование КЛКТ в карточку пациента впервые, то выберите одно из действий:


- загрузить файлы;
- загрузить папку;
- перетащить файл/папку с исследованием в данное окно.

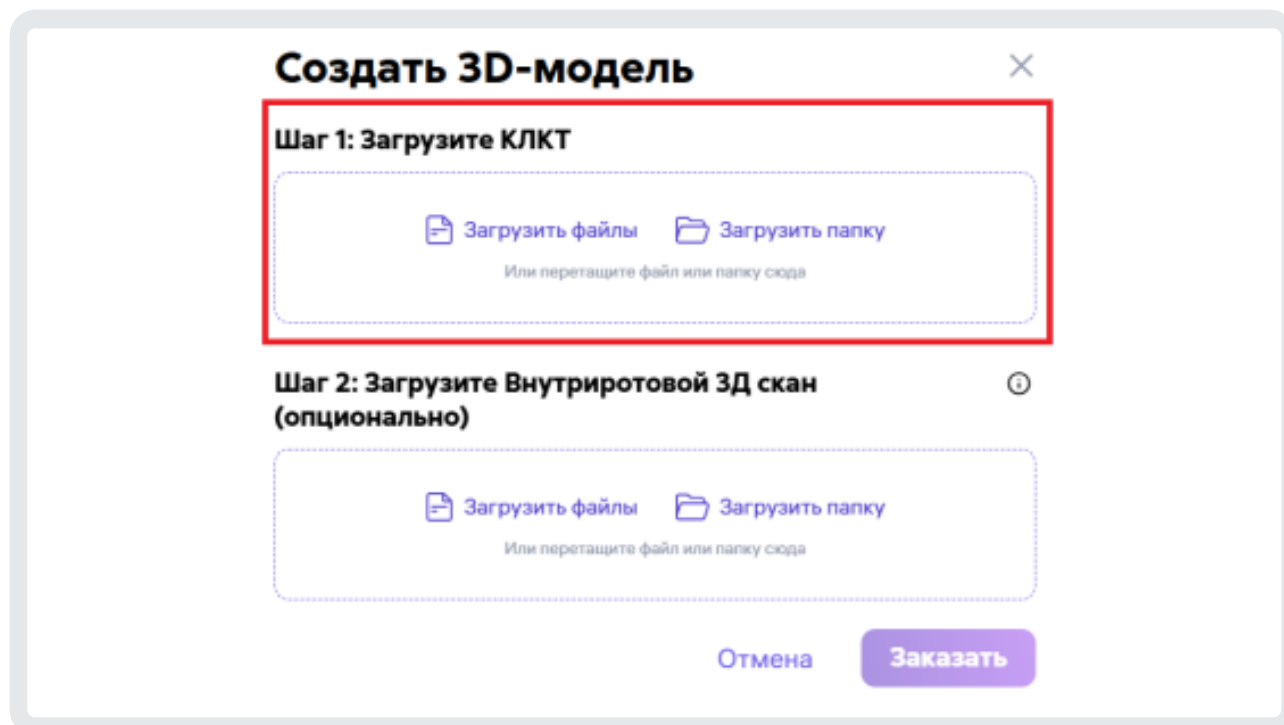

Если в карточку пациента ранее загружались снимки КЛКТ, нажмите на стрелку справа, чтобы раскрыть список с превью исследований. Выберите нужное или загрузите новое исследование с помощью кнопок ниже, если нужного КЛКТ нет среди ранее загруженных.

Создать 3D-модель

Шаг 1: Выберите КЛКТ

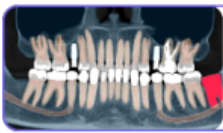

КЛКТ 18.04.2023

Создано 18 апр. 2023 г.

Загрузить файлы

Загрузить папку

Или перетащите файл или папку сюда

Шаг 2: Выберите Внутриротовой 3Д скан (опционально)

Выберите

Отмена

Заказать

3 Загрузите или выберите интраоральный 3D-скан

Необходимо загрузить два файла: один для верхней челюсти и один для нижней челюсти.

Порядок загрузки аналогичен: если сканы загружаются впервые, используйте кнопки «Загрузить файлы», «Загрузить папку» или перетащите файлы в окно. Если сканы были загружены ранее, выберите их из раскрывающегося списка.

Создать 3D-модель

Шаг 1: Выберите КЛКТ



18 апр. 2023 г.

Шаг 2: Выберите Внутриротовой 3Д скан (опционально)



Внутриротовой 3Д скан 29.01.2025

Создано 29 янв. 2025 г.

Загрузить файлы

Загрузить папку

Или перетащите файл или папку сюда

Отмена


Заказать

Примечание:


Поддерживаются файлы следующих типов:  
\*.STL, \*.OBJ,  
\*.PLY, \*.DRC.

**4** Нажмите кнопку «Заказать». Дождитесь загрузки и формирования отчета.

Если файлы загружаются впервые, в левом нижнем углу появится окно с индикатором прогресса загрузки.

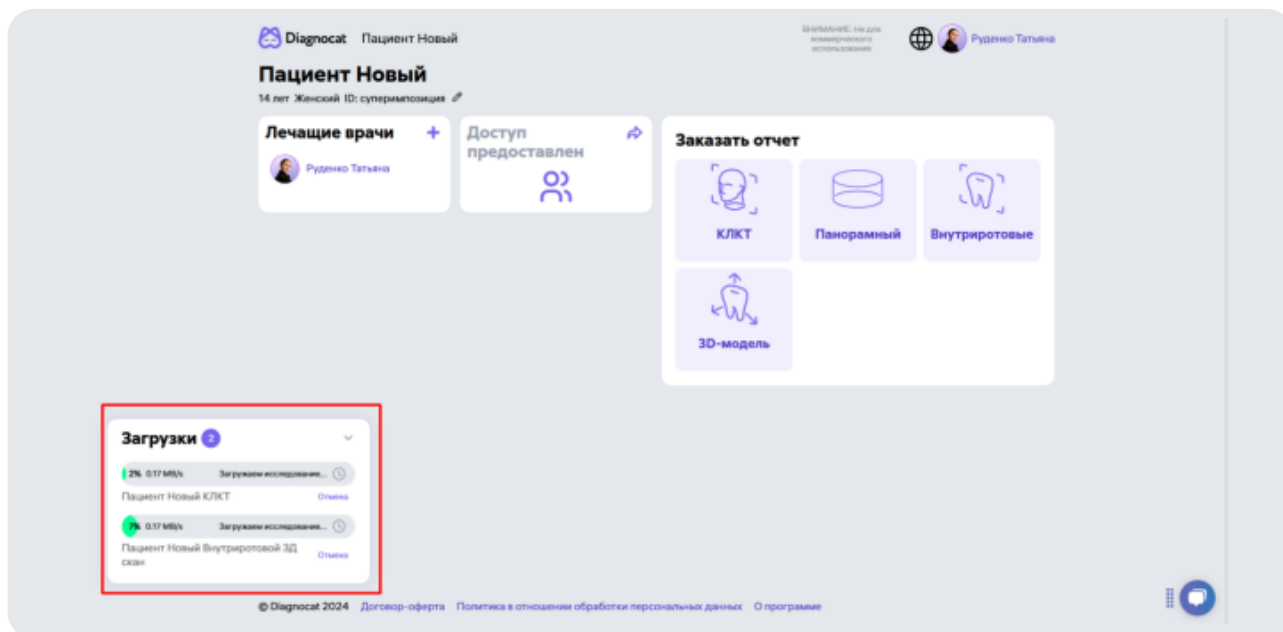

После загрузки файлов (или если они были загружены ранее) появится уведомление с индикатором прогресса создания отчета.

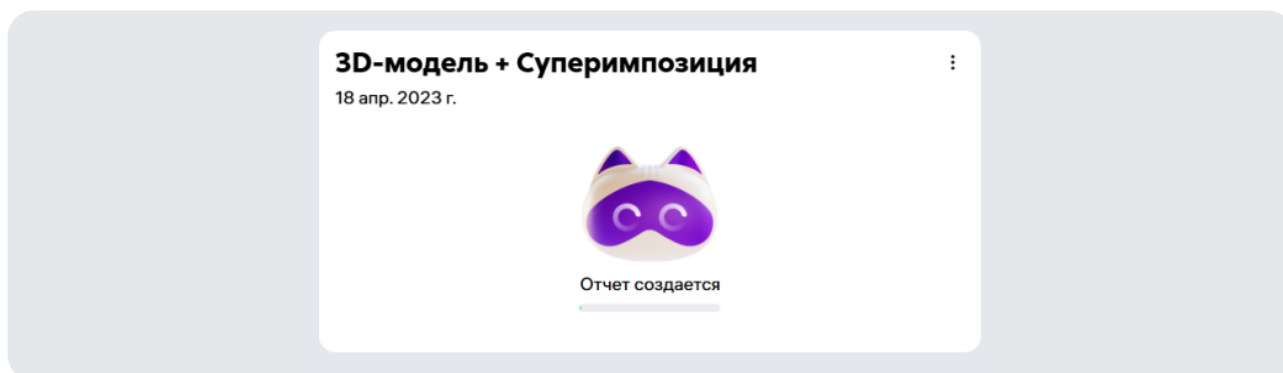

**5** Как только отчет будет готов, нажмите на его изображение, чтобы открыть

